

BeautiBond

ФОТООТВЕРЖДАЕМАЯ,
САМОПРОТРАВЛИВАЮЩАЯ,
ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ АДГЕЗИВНАЯ СИСТЕМА



ОДИН КОМПОНЕНТ – ОДИН СЛОЙ ...

BeautiBond - инновационный, "три-в-одном" адгезив 7-го поколения для реставраций натуральной эмали и дентина. Данная система демонстрирует высокую начальную силу адгезии, которая сохраняется в течение длительного времени.

Протравливание, прайминг и бондинг осуществляется только одним компонентом и во время одной аппликации. Нет необходимости в утомительных процедурах, таких как встряхивание или смешивание. Вы легко достигнете надежного результата.

К тому же, постоперативная чувствительность или изменение цвета десны полностью исключены благодаря уникальной химической формуле BeautiBond.


Очень тонкая пленка адгезива оставляет достаточно места для создания реставраций с высокой эстетикой.

7th
GENERATION

Высокая сила адгезии

Превосходная адгезия к эмали и дентину благодаря двум специально разработанным мономерам. Сила адгезии сравнима с таковой двухкомпонентных систем.


Начальная сила адгезии через 24 ч.

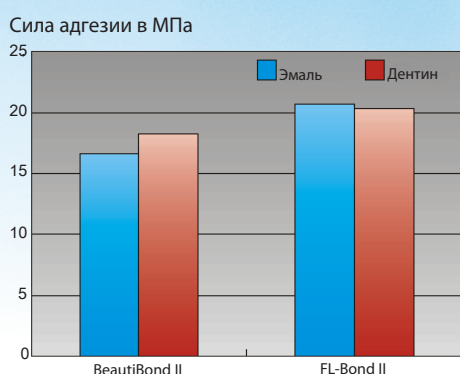

Длительная стабильность

Отсутствие чувствительных к гидролизу НЕМА предотвращает вызываемое гидролизом старение и гарантирует постоянную силу и безопасность адгезии.

Постоянная сила адгезии

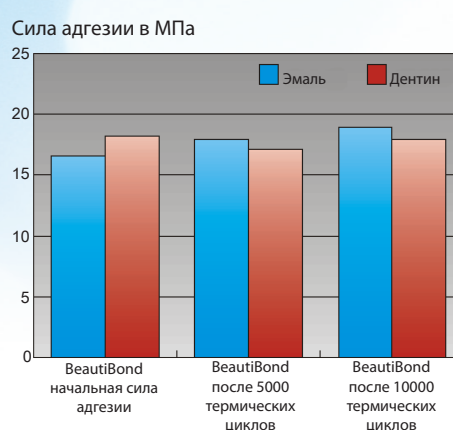

Источник: Внутренние данные SHOFU INC., Япония

..ПРОСТО, БЫСТРО, НАДЕЖНО

Кондиционирование эмали и дентина с помощью только одного компонента

Для более сложных реставраций, в частности, позволяет избежать ненужных и чувствительных к технике процедур, тем самым обеспечивая дополнительную безопасность. Более того, очень тонкий слой адгезива создает невидимую границу реставрации.



Нанесение BeautiBond, высушивание и полимеризация. Обратите внимание на адекватное высушивание.




Стабилизация поверхности с использованием BEAUTIFIL Flow F10 (A3.5) и реставрация BEAUTIFIL II (A3.5+Inc). Благодаря тонкому слою адгезива, нет видимой границы реставрации.

Клинические фотографии любезно предоставлены д-ром Канамура

Независимые исследования BeautiBond

На "3-м Конгрессе Адгезивной Стоматологии 2008", проф. Сано и д-р Кавамото из Университета Хоккайдо, Япония, представили сравнительное изучение предельной силы адгезии на разрыв BeautiBond, в том числе при искусственном изнашивании, с конкурирующими продуктами 6-го и 7-го поколения. По сравнению с двухкомпонентными системами 6-го и с адгезивами 7-го поколения, изменения при изнашивании были минимальны. Интересно, что превосходная адгезия BeautiBond к дентину была открыта после сравнения с конкурентными однокомпонентными системами с подобными упрощенными рабочими характеристиками.

Сила адгезии в МПа

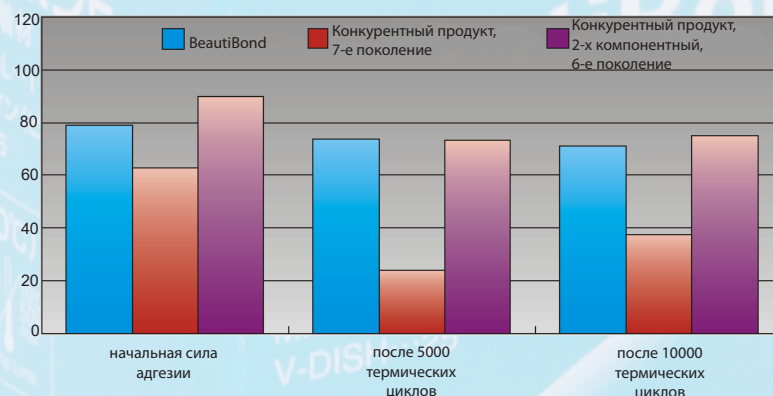


Источник: "Сила адгезии на разрыв одно-/двухкомпонентных самопротравливающих адгезивов при применении метода термических циклов Новеля"

KAWAMOTO Chiharu, NAGANO Futami, YASUMOTO Kei, SANO Hidehiko; Кафедра реставрационной стоматологии, Постдипломная школа дентальной медицины, Университет Хоккайдо, Саппоро, Япония
"Третий Интернациональный Конгресс Адгезивной Стоматологии" 2008 Сянь, Китай


Тонкий слой адгезива

С очень тонким слоем адгезива около 5 μm , остается достаточно места для композитной реставрации. Таким образом, создается возможность эстетического восстановления даже плоских и неглубоких полостей в контексте минимально инвазивной терапии.

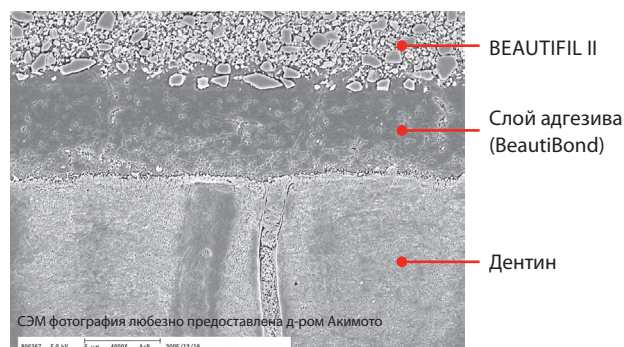

После 30 сек. протравливания ионами аргона

Эстетичная основа даже для плоских и неглубоких реставраций

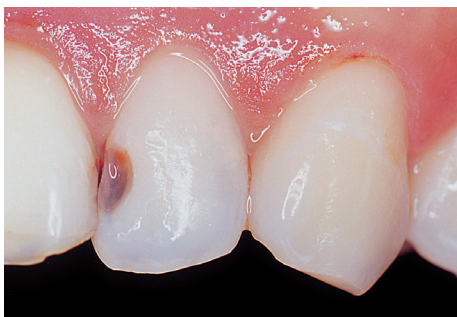

Консервативное препарирование зуба перед нанесением однокомпонентного адгезива BeautiBond.



Нанесение BeautiBond, высушивание и полимеризация светом. Тонкий слой адгезива оставляет достаточно пространства для эстетического восстановления небольших полостей.




Превосходный результат с невидимой границей реставрации из BEAUTIFIL II.

Клинические фотографии любезно предоставлены д-ром Миязаки

... ПРОСТОЙ, БЫСТРЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ

Простая безопасность

Отсутствие сложных и чувствительных к технике процедур гарантирует быструю и простую адгезию. Начните заполнение полости материалом ранее, чем через 30 секунд после начала применения адгезива.

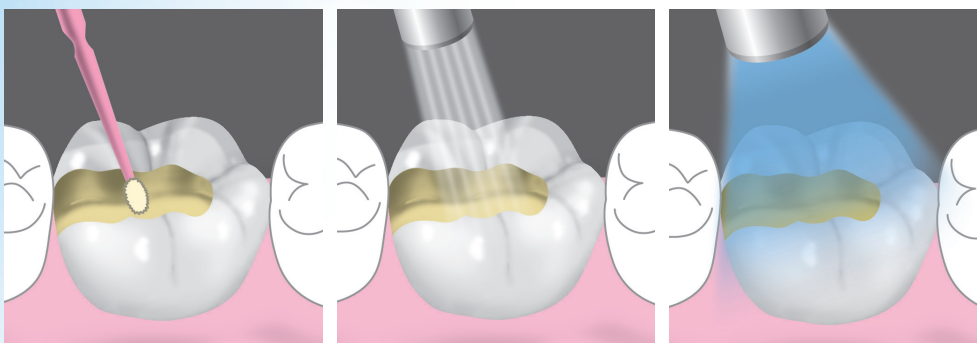

1. Нанесите BeautiBond и оставьте на 10 сек.

2. Аккуратно просушите воздухом в течение 3 сек., затем раздуйте в течение 2 сек. под сильным давлением для того, чтобы полностью убрать воду и летучие компоненты.

3. Полимеризация светом (галогеновая лампа: 10 сек., LED: 5 сек.).

Оптимальная основа для реставрации

Реставрация небольших полостей возле десны ассоциируется с рядом сложностей. В связи с этим, преимуществом является наличие под рукой подходящего адгезива с высокой силой адгезии к дентину. Этими качествами обладает BeautiBond, который вместе с тем помогает избежать воспаления окружающего десневого края. После полимеризации слоя адгезива, Beauti-Bond облегчает последующие процедуры благодаря оптимальному бондингу композита.



Как показывает опыт, при лечении клиновидных дефектов могут возникнуть трудности с внесением реставрационного материала. Поэтому полимеризованный слой адгезива должен помогать восстановлению композитом.



Даже неглубокие полости могут быть легко восстановлены.



Завершенная реставрация BEAUTIFIL II.

Информация для заказа



BeautiBond

- BeautiBond 6 мл (флакон)
- Микрокисти тонкие (1 ручка, 50 насадок)
- Палетки, 25 шт.

PN 1781



BeautiBond - Унидозы

- BeautiBond 0.1 мл (капсула), 50 шт.
- Микрокисти тонкие, 50 шт.

PN 1782



BEAUTIFIL II

Выделяющий фтор композит в шприцах по 4.5 г и в капсулах по 0.25 г. Представлен в оттенках A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, Incisal, Bleaching White, A2O, A3O



BEAUTIFIL Flow F02

Выделяющий фтор вязкий композит в шприцах по 2 г, представлен в оттенках A1, A2, A3, A3.5, A4, A3O, G (Десневой)



BEAUTIFIL Flow F10

Выделяющий фтор текучий композит в шприцах по 2 г, представлен в оттенках A1, A2, A3, A3.5, A4, A3O, A3T.



BEAUTIFIL Opaquer

Выделяющий фтор композит с высокой опакостью в шприцах по 2 г, представлен в оттенках UO (Универсальный Опак) и LO (Светлый Опак).



Официальный дистрибьютор компании SHOFU в Республике Беларусь

УП "Фармакорс"

1-й Твердый переулок, 5-100, 220037 Минск

тел. (017) 2948511, (017) 2853433, факс (017) 2100522, e-mail: info@belomnimed.by

<http://belomnimed.by>