

Советы и рекомендации

Подготовка:

- Перед получением оттиска закройте промежутки с помощью воска или коронок Frasaco. Прикрепите коронки Frasaco к соседним зубам с помощью адгезивного воска.

Создание временной реставрации:

- Изолируйте культю из композита с помощью водорастворимого разделительного геля.
- Заполните оттиск материалом Luxatemp от окклюзионной поверхности к десневому краю с небольшим избытком.
- Удерживайте кончик смешивающей канюли погруженным в материал, чтобы избежать образования пузырьков воздуха.
- Постепенно устанавливайте заполненный слепок на зубы, проверьте правильность посадки не изменяя контактное давление.
- Контролируйте процесс отверждения в полости рта, например, с помощью образца материала на тыльной стороне ладони.

Извлеките временную реставрацию, пока материал находится в эластичной фазе.
Примечание: Удалите грубые излишки, когда материал находится в эластичной фазе, особенно с внешней стороны возле контактных пунктов; см. рисунок.

- Добейтесь максимальной точности: после извлечения верните временную реставрацию в зону препарирования до полной полимеризации.

Финишная обработка:

- С помощью карандаша заранее отметьте контактные пункты и границы препарирования.
- Временная реставрация должна располагаться краями вверх в процессе финишной обработки для возможности осмотра внутренней поверхности.
Завершение: После проверки посадки отполируйте или покройте временную реставрацию лаком для снижения адгезии биопленки.



Установка:

- Несколько раз проверьте контактные пункты и окклюзию в ротовой полости с помощью окклюзионной фольги и зубного флосса. Проверьте краевое прилегание по линии препарирования.
Важно: Тонкие края способствуют регенерации ткани.
- Заполните и последовательно зафиксируйте коронки с помощью ТемпоСет.
Внимание: Временные цементы, содержащие эвгенол, могут препятствовать отверждению постоянных композитных цемента.

Починка:

- При сохранении смазанного слоя (также: ингибированный кислородом слой) можно удалить поры и провести восстановление без нанесения адгезива.
- При необходимости используйте LuxaFlow для починки.
- Используйте кисточку и материал Luxatemp-Glaze & Bond для моделирования/сглаживания LuxaFlow Star перед фотополимеризацией.
- В случае с изношенными или сточенными временными реставрациями нанесите тонкий слой материала Luxatemp-Glaze & Bond на поверхность для ее подготовки к использованию LuxaFlow Star и фотополимеризации. Придайте поверхности легкую шероховатость, например, с помощью фрезы.

Общее:

- Продукты семейства Luxatemp могут наноситься как внутри ротовой полости, так и вне ее.

Какие оттенки доступны?

Luxatemp: A1, A2, A3, A3,5, B1, Bleach Light
LuxaFlow Star: A1, A2, A3, A3,5, B1

Сколько единичных коронок можно изготовить из материала, содержащегося в одном картридже?

34-38 отдельных коронок

Сколько мостовидных конструкций из трех элементов можно изготовить из материала, содержащегося в одном картридже?

23-25 мостовидных конструкций

Luxatemp

Идеальная временная реставрация

Функции временной реставрации

- Защита отпрепарированного зуба от термических, механических и химических воздействий
- Сохранение правильного положения зуба / сохранение места: предупреждает наклон соседних зубов или выдвижение антагонистов или подготовленного зуба
- Восстановление функции, произношения и эстетики
- Имитация окончательной реставрации для зубного техника и пациента

Показания

- Временные коронки и мостовидные протезы
- Временные виниры
- Временные вкладки и накладки
- Долгосрочные временные конструкции
- Прототип лечения (mock-up)

Преимущества Luxatemp Star


- Значительно увеличенные сопротивление излому и прочность на изгиб
- Повышенная начальная твердость
- Более быстрое достижение конечной твердости
- Превосходная эстетика и долговременная стабильность цвета
- Индивидуализация с помощью различных оттенков
- Точность посадки
- Надежность и стабильность при хранении
- Возможен ремонт конструкций
- Низкая температура полимеризации



ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ

Оттиски	Создание временной реставрации	Фиксация	Подготовка и восстановление
- LuxaForm - StatusBlue	- Luxatemp Star - Luxatemp-Fluorescence - Luxatemp-Plus - Luxatemp-Solar	- TempoCem - TempoCemNE - TempoCemID	- Luxatemp-Glaze & Bond - LuxaFlow Star

Создание временной реставрации с использованием Luxatemp

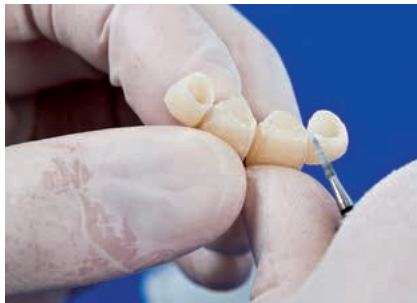

1. Получение оттиска (альтернативно: использование термоформируемой зубной шины)

- Ситуационный оттиск без пузырьков с использованием силикона или альгината.
- Подготовьте оттиск: удалите излишки, при необходимости удалите перегородки и / или область неба, маркируйте центр (резцы).
- Проведите повторную проверку посадки с использованием слепка (рот/модель).
- Очистите оттиск.

2. Создание временной конструкции

- Заполните оттиск в области временной реставрации.
Важно: Заполняйте оттиск снизу вверх, со смешивающей канюлей, погруженной в материал, для предотвращения образования пузырьков. Последовательно заполняйте оттиск до уровня слизистой с небольшим избытком.
Внимание: При наличии пузырьков удалите их с помощью зонда. Не забывайте создать образец материала.
- Высушите область препарирования в течение 2 секунд.
- Медленно введите оттискную ложку в полость рта.
Важно: Давление должно быть равномерным и не меняться.
- Контролируйте процесс отверждения с помощью образца: пока материал сохраняет эластичность, но также характеризуется размерной стабильностью («фаза желатиновых конфет»), осторожно удалите оттискную ложку.
- Осторожно извлеките мягкую временную реставрацию из оттиска и зоны препарирования.
Совет: Проще делать это с использованием целлюлозной ткани или тампона.
- Удалите излишки.
- Повторно установите временную реставрацию на подготовленную область после удаления излишков/поднудрений.
- Если отверждение материала в области препарирования невозможно, верните временную конструкцию в оттиск и дождитесь полной полимеризации.

3. Финишная обработка временной конструкции

- Удалите смазанный слой с помощью спирта, чтобы исключить прилипание к фрезеровочному инструменту.
- Удалите деформированные участки, создайте контактные пункты.
Совет: Контактные поверхности плоские, находятся в верхней трети (отметьте карандашом)
Внимание: Создавайте проксимальные контактные пункты только после удаления всех деформаций.
- Обработайте края (границы препарирования) (при необходимости заранее отметьте карандашом). Еще раз проверьте посадку.
Совет: Всегда заранее удаляйте пыль от препарирования с временной реставрации.
Внимание: Оклюзию можно проверять только после точной установки временной реставрации на препарированный зуб.
- Проверьте окклюзию, при необходимости проведите коррекцию.
- Очистите временную реставрацию (не сушить, композит может стать хрупким).

4. Полировка

- Отполируйте временную реставрацию резиновым полиром и предварительно отполируйте кисточкой из козьей шерсти, а затем отполируйте до блеска пуховкой. Возможные инструменты: Пемза или полировочная паста.
- Нанесите тонкий слой Luxatemp-Glaze & Bond (при необходимости несколько раз) и полимеризуйте светом
Внимание: Будьте аккуратны при работе с контактными поверхностями, так как многочисленные слои укрепляют контактный пункт.

Восстановление и индивидуализация временной реставрации



1. Очистите восстанавливаемую поверхность спиртом и обработайте песком. Затем нанесите Luxatemp-Glaze & Bond и проведите полимеризацию светом. Следуйте инструкции по применению.

Примечание: Не требуется для индивидуализации и восстановления только что изготовленной временной конструкции, поскольку сохраняется смазанный слой.



2. Затем нанесите LuxaFlow Star с небольшими излишками и сгладьте.

Совет: Используйте кисточку, покрытую материалом Luxatemp-Glaze & Bond.



3. Полимеризуйте светом каждый наносимый слой в течение 30-40 секунд.

Совет: При нанесении нескольких слоев не удаляйте смазанный слой, поскольку он необходим для адгезии со следующим слоем.



4. Проведите обычную подготовку: Создайте контактные пункты, обработайте края и несколько раз проверьте посадку. Проверьте окклюзию, при необходимости проведите коррекцию. Затем отполируйте; см. левую сторону.

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ			
	Рабочее время (в полости рта)	Эластичная фаза (вне полости рта)	Время отверждения
Luxatemp Star	0:00 – 0:45 мин.	1:30 – 2:20 мин.	5:00 мин.
Luxatemp-Fluorescence	0:00 – 0:45 мин.	2:00 – 3:00 мин.	6:00 – 7:00 мин.
Luxatemp-Plus	0:00 – 0:45 мин.	2:00 – 3:00 мин.	6:00 – 7:00 мин.
Luxatemp-Solar	0:00 – 1:10 мин.	2:00 – 4:00 мин.	Фотополимеризация:* 20 с / единица Печь для полимеризации: как минимум 60 с.
LuxaFlow Star	Нанесите слои с максимальной толщиной 2 мм		Фотополимеризация:* 30 - 40 с / слой
Luxatemp-Glaze & Bond	нанесите тонким слоем без пузырьков		Фотополимеризация: в течение 2 минут. Время контакта составляет 20 с. Фотополимеризация 20 с / единица Печь для полимеризации: как минимум 90 с.

* мин. 400 мВт/см²