


Ecosite

Качественная реставрация. Мгновенно

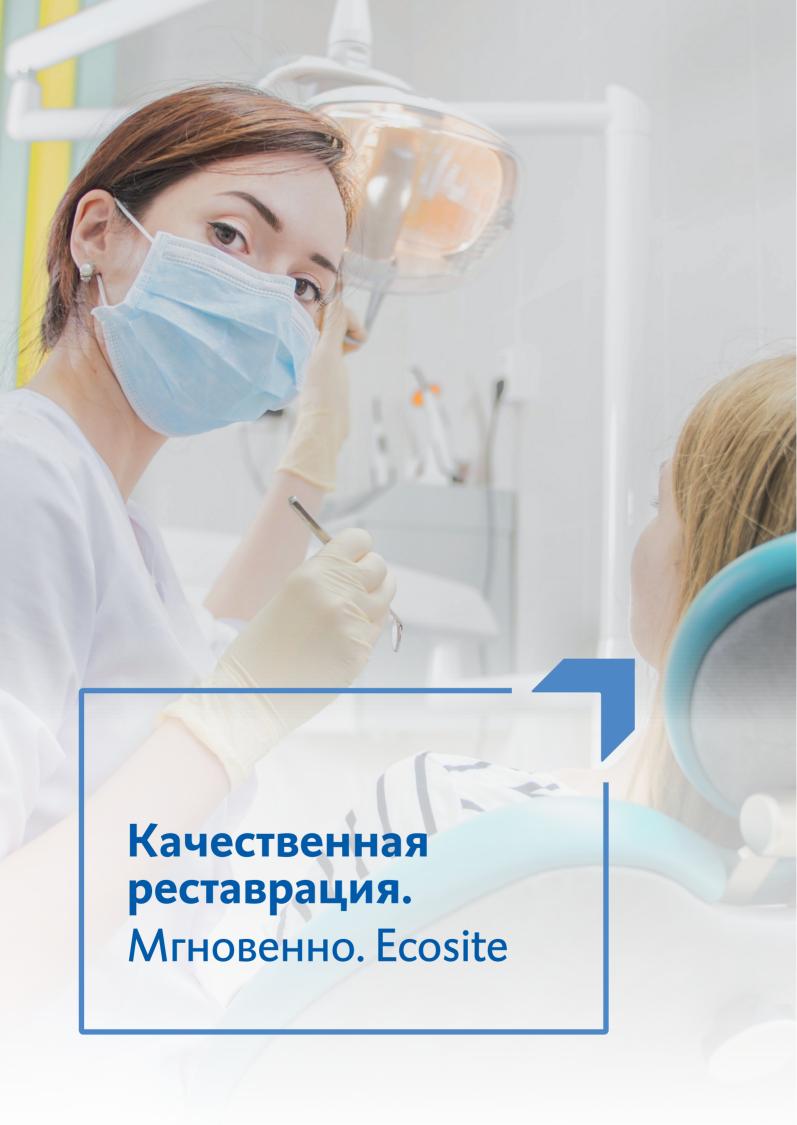



Без проблем с деформацией растяжения Без послойного нанесения

Необыкновенная простота применения и долговечность.

В двух словах: Реставрация никогда не была проще, чем с новым Ecosite.

Пакуемый композит быстро наносится всего одним слоем и отверждается на глубину до 5 мм. Благодаря своей плотной консистенции материал прекрасно моделируется, что позволяет легко создавать точные контактные пункты зубов.

ЭТО УСКОРЯЕТ ПРОЦЕСС, И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ГАРАНТИРУЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РЕСТАВРАЦИИ.

Еще никогда не было так легко


создавать высококачественные реставрации

СКОРОСТЬ И ПРОСТОТА ПРОЦЕДУРЫ

Когда дело касается стандартных реставраций, нет более быстрой и простой альтернативы. Без необходимости трудоемкого послойного нанесения, одноэтапная реставрация из Ecosite максимально сокращает время работы.

Еще один плюс: Материал гарантирует надежное полное застывание слоя глубиной до 5 мм всего за 20 секунд.

Повышенная плотность пакуемого материала обеспечивает оптимальную точность внесения. Для вашей работы это означает очень эффективное моделирование (без »растеканий«), простое формирование контактных пунктов зуба, значительное сокращение переделок, а также быструю и легкую финишную обработку.

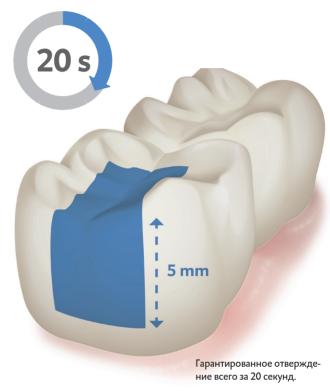

НАДЕЖНОСТЬ


Haпряжение? Его можно избежать. Ecosite Bulk Fill имеет очень низкие показатели полимеризационного стресса.

Наногибридный композит также отличается непревзойденными механическими свойствами. Особая технология наполнителя из смеси тонкого стекла и наночастиц (содержание наполнителя: 82 вес. %) делает это возможным.

Ecosite Bulk Fill отлично пакуется, и в то же время становится очень податливым при давлении, что позволяет контролировать адаптацию к стенкам полости. Более того, отсутствие границ между слоями исключает появление пузырьков или трещин в зонах между отдельными порциями композита.

Все очень просто.

НИЗКИЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИОННЫЙ СТРЕСС

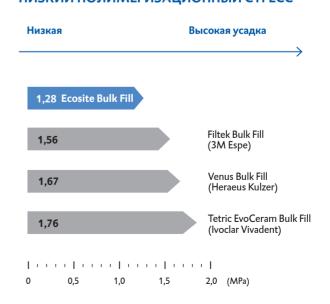

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТТЕНКОВ

Система оттенков Ecosite Bulk Fill - интуитивная и практичная:

- Два эстетичных оттенка для всех реставраций: Универсальный и Светлый
- Идеальное соответствие цвета материала окружающим тканям зуба
- Контрастная версия
- Для восстановления культи зуба и всех других применений, где необходим контраст со здоровыми тканями зуба




Светлый Универсальный Контрастный

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ **НАПОЛНИТЕЛЯ**

Специальная нанотехнология обеспечивает равномерное распределение самых мелких частиц наполнителя. Это гарантирует непревзойденные механические свойства и отличную полируемость для высокого блеска реставрации после обработки.

ИЗОБРАЖЕНИЯ СЭМ

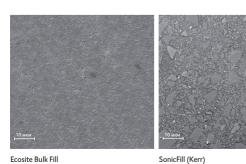



Оптимизированная технология наполнителя гарантирует непревзойденные рабочие характеристики.

Источник: Собственные графические материалы, DMG, 2018

СОЗДАНИЕ ОДНОСЛОЙНОЙ РЕСТАВРАЦИИ ГЛУБИНОЙ ДО 5 ММ



Исходная ситуация: на медиальной поверхности зуба 36 – поражение класса II, выявленное с помощью интерпроксимальной рентгенографии.



Препарирование полости и установка секционной матрицы.



Адаптация материала к стенкам полости.



Окончательный результат, превосходная полируемость.

Оптимальная адгезия обеспечена


ПОЛНАЯ СВОБОДА

Ecosite-Bond, входящий в состав стартового набора, является идеальным помощником при работе с современным, простым в применении композитом. Универсальный адгезив светового отверждения в 1 флаконе дает Вам право выбора на этапе травления: тотальное, селективное протравливание или самопротравливание?

Выбор остается за вами.

Ecosite-Bond — адгезив светового отверждения в технике тотального, селективного и самостоятельного травления для прямых реставраций всех классов полостей в комбинации с фотоотверждаемыми композитными материалами. Независимо от того, проводится ли предварительное протравливание ортофосфорной кислотой или адгезив используется как самопротравливающий, Ecosite-Bond демонстрирует оптимальную прочность сцепления в любой ситуации!

ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ ПРИ СДВИГЕ

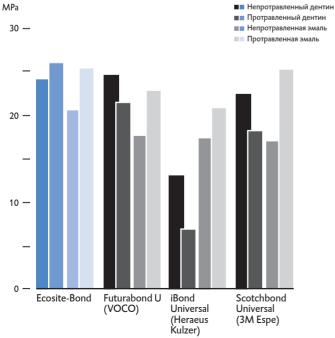

Источник: Собственные измерения, ISO 29022, DMG, 2016

ПРОВОДИТЕ ТРАВЛЕНИЕ ТАК, КАК ВАМ УДОБНО.



Быстрое и простое использование адгезива в режиме самопротравливания.



Простое использование в сочетании с протравливанием эмали.



Простое использование в сочетании с тотальным протравливанием.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Наносится одним слоем без дополнительного внешнего покрытия
- > Гарантированное отверждение до 5 мм
- > Низкие показатели полимеризационного стресса
- > Простота моделирования
- > Точность формирования контактного пункта
- > Непревзойденные механические свойства благодаря специальной технологии наполнителя

ВАШ ПОМОЩНИК В СЛЕДУЮЩИХ СИТУАЦИЯХ:

- Восстановление жевательных зубов (класс I и II, включая реставрацию отдельных бугров)
- Реставрации V класса (пришеечный кариес, прикорневая эрозия, клиновидные дефекты)
- > Восстановление культи зуба
- Реставрации молочных зубов
- Расширенная герметизация фиссур моляров и премоляров

REF 220758



ОБЗОР ПРОДУКТА

Ecosite Bulk Fill		
Стартовый набор:	3 Шприца 4 г, оттенки Универсальный (2 шт.), Светлый (1 шт.), 1 флакон Ecosite-Bond 5 мл	REF 220750
	48 капсул Safetip 0,25 г, оттенки Универсальный (32 шт.), Светлый (16 шт.),	
	1 флакон Ecosite-Bond 5 мл	REF 220751
Дополнительный набор:	1 Шприц 4 г, оттенок Светлый	REF 220752
	1 Шприц 4 г, оттенок Универсальный	REF 220753
	1 Шприц 4 г, оттенок Контрастный	REF 220754
	16 капсул Safetip 0,25 г, оттенок Светлый	REF 220755
	16 капсул Safetip 0,25 г, оттенок Универсальный	REF 220756
	16 капсул Safetip 0,25 г, оттенок Контрастный	REF 220757

1 Флакон Ecosite-Bond 5 мл

Официальный дистрибьютор DMG в Республике Беларусь УП "Фармакорс"

1-й Твердый переулок 5-100 220037 Минск 8017-2853444, 8017-2948511

DMG

Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbHElbgaustraße 248 22547 Hamburg Germany

Fon: +49. (0) 40.84 006-0 Fax: +49. (0) 40.84 006-222 info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com www.facebook.com/dmgdental

