



Flairesse

Идеальный комплекс
для профилактики.



Flairesse: идеальный комплекс для профилактики

Профилактика вместо лечения.

Сохранение тканей зуба вместо препарирования.

Профилактический подход в стоматологии сегодня вызывает интерес не только у профессионалов. Он пользуется все большей популярностью и у пациентов. При этом, по мнению специалистов компании DMG, важную роль в профилактике кариеса должна играть профессиональная гигиена полости рта, которая проводится специалистами в условиях стоматологического кабинета. Именно с этой целью была создана продукция Flairesse – новая система профилактики кариеса. Ее главное достоинство – идеальное сочетание составляющих - пасты, пенки или геля и лака. Продукты серии Flairesse имеют в своем составе ксилит и фтор, абсолютно не содержат сахара и обладают свежим фруктовым вкусом (три разновидности).

Ваши пациенты будут в восторге!



До полировки с Flairesse.



После полировки с Flairesse.

DMG: чем раньше, тем лучше.

Сегодня практикующие стоматологи все чаще отдают предпочтение минимально инвазивным методам лечения. Следуя этой тенденции, компания DMG предложила «Ison» – препарат для инфильтрации начального кариеса. Это первый в мире продукт, благодаря которому можно без препарирования остановить кариес на ранней стадии, т.е. до того, как он станет серьезной проблемой.

А новая разработка компании DMG – профессиональная программа Flairesse – это еще один шаг в вперед на пути к реализации всеобъемлющей, системной профилактики кариеса.

Вкусная смесь.

Смешайте клубнику с дыней и добавьте небольшой заряд свежести с оттенком мяты. Кто сказал, что профессиональная чистка зубов не может быть творческой?

Благодаря трем любимым вкусам профилактика с системой Flairesse становится истинным наслаждением.

Ведь чем вкуснее, тем приятнее!

Содержит ксилит.


Flairesse содержит ксилит — заменитель сахара, который уменьшает кариесогенность зубного налета. Кариесстатический и противокариозный эффект ксилита подтвержден клиническими исследованиями. Полезно знать: *Streptococcus mutans* и большинство других кислотообразующих бактерий не могут его усваивать и гибнут. Это предотвращает прикрепление бактерий к поверхности зуба и образование биопленки.

Фторид натрия, содержащийся в Flairesse, укрепляет зубную эмаль.


Способствует реминерализации

Как известно, для здоровья зубов очень важны фториды. Они предотвращают разрушение эмали, способствуют ее реминерализации и повышают устойчивость эмали к воздействию кислот. Именно поэтому все продукты линии Flairesse содержат фториды.


Далее – более подробно о концепции системы в целом и идеальном сочетании ее компонентов.

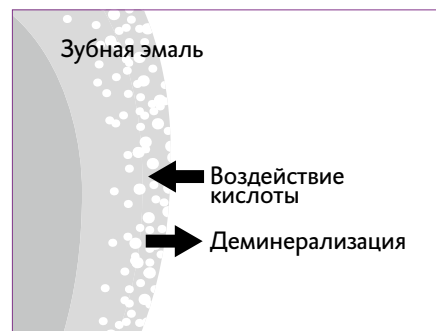

Кислота воздействует на эмаль, вызывая растворение минеральных компонентов зуба. В результате структура эмали становится нестабильной.

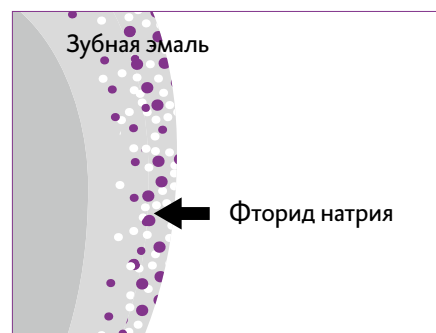

Фторид натрия, содержащийся в Flairesse, укрепляет зубную эмаль.

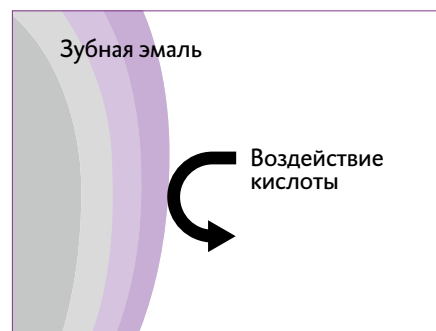

Содержащая необходимое количество фтора зубная эмаль лучше противостоит воздействию кислоты и лучше защищает зуб.

Четыре профессиональных продукта для профилактики

Flairesse предлагает гораздо больше, чем любой другой продукт

Профилактическая линия Flairesse состоит из четырех профессиональных продуктов, каждый из которых имеет свое предназначение. При этом отдельные компоненты, дополняя друг друга, «охватывают» весь процесс (шаг за шагом) профессиональной профилактической чистки зубов.

Вы можете использовать продукты по отдельности, и они будут эффективны, или комбинировать их друг с другом — выбор за Вами.

Обо всем по порядку

Без сомнения, обычный ежедневный уход за зубами является важнейшим фактором сохранения их здоровья. Однако профессиональная профилактическая чистка в клинике может дать гораздо больше.

Flairesse — незаменимый помощник на каждом ее этапе:

- удалить пигментированный и мягкий зубной налет Вы можете с помощью Пасты;
- для укрепления эмали выберите Гель или Пенку;
- чтобы обеспечить надежную защиту и уменьшить чувствительность зубов, используйте Лак.

Все эти продукты гипоаллергенны и имеют приятный свежий вкус.



Профилактическая процедура

Flairesse

Профилактическая зубная паста

- Мята
- Дыня

Чистка

Flairesse

Профилактическая пенка

- Мята
- Дыня
- Клубника

Профилактический гель

- Мята
- Дыня
- Клубника

Укрепление

Flairesse

Профилактический лак

- Мята
- Дыня

Уменьшение чувствительности

Эффективное очищение:

Профилактическая паста Flairesse

Профилактическая паста Flairesse удаляет зубные отложения и полирует поверхность зуба. Пациент сразу почувствует результат.

Три размера абразивных частиц — крупный, средний, мелкий — позволяют точно регулировать степень обработки зуба.

Очень нежный: благодаря Flairesse исключается излишнее абразивное воздействие на структуры зуба и реставрации. Паста содержит фториды и не имеет в своем составе известных аллергенов.

Веские аргументы в пользу профилактической пасты Flairesse:

- отличный чистящий и полирующий эффект;
- не разбрызгивается;
- три степени абразивности;
- два свежих вкуса — мята и дыня;
- содержит ксилит и фторид;
- не содержит известных аллергенов;
- две формы упаковки — тюбик и унидозы с кольцом-держателем.



Защитная пленка легко снимается с упаковки унидозы.



Наберите пасту на полировочную чашечку или щетку.



Обработайте поверхность зуба с помощью пасты.



Поддесневые и контактные зубные отложения легко удаляются с помощью полировочной чашечки.



Зубные отложения с жевательной поверхности успешно удаляются при помощи щетки.

Интенсивное укрепление:

Профилактический гель и пенка Flairesse

Основная задача — укрепление, укрепление и еще раз укрепление.

Вы можете выбрать гель или пенку в зависимости от Ваших предпочтений и с учетом пожеланий пациента. Дети, например, любят пенку Flairesse за незабываемые ощущения во рту.

Оба продукта просты и эффективны в применении, поэтому Вы можете выбрать любой из них. Гель и пенка образуют на поверхности зуба защитный слой, способствуют реминерализации и препятствуют разрушению эмали.

Для эффективного воздействия достаточно одной минуты. Разве не приятно, что защита зубов теперь занимает так мало времени?

Веские аргументы в пользу профилактического геля и профилактической пенки Flairesse:

- увеличивают устойчивость эмали к воздействию кислот;
- содержат ксилит и фторид;
- не стекают;
- время аппликации — всего 1 минута;
- три свежих вкуса — мята, дыня и клубника;
- можно вносить с помощью аппликационной ложки.



Для удобства использования поместите профилактический гель Flairesse в стеклянный тигель для жидкости.



Нанесите профилактический гель Flairesse с помощью полировочной чашечки.



Профилактический гель Flairesse идеален для применения с аппликационной ложкой.



Профилактическую пенку Flairesse также удобно вносить с помощью аппликационной ложки.



Внесите аппликационную ложку в полость рта пациента.

Надежная защита:

Профилактический лак Flairesse

И последнее, но не менее важное средство — профилактический лак Flairesse. Он надежно запечатывает дентинные каналы, тем самым уменьшая их чувствительность — это настоящая победа над гиперчувствительностью зубов!

Как и другие компоненты системы Flairesse, лак содержит ксилит и фторид.


«Flairesse-улыбки» выглядят фантастически, а их обладатели всегда спокойны: прозрачный лак не заметен на зубах.

Веские аргументы в пользу профилактического лака Flairesse:

- надежный десенситайзер;
- содержит ксилит и фторид;
- незаметен на зубах;
- два свежих вкуса — мята и дыня;
- удобен в применении;
- имеет в комплекте аппликационную кисточку.



Защитная пленка легко снимается с упаковки унидозы.

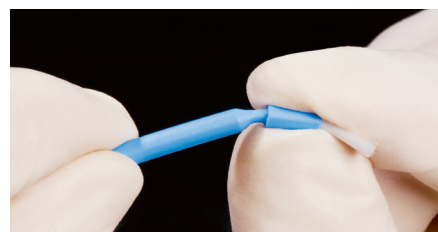

Аппликационную кисточку можно согнуть под нужным углом, что облегчает обработку труднодоступных областей.



Перемешайте профилактический лак Flairesse с помощью входящей в комплект аппликационной кисточки.



Профилактический лак Flairesse легко наносится.



Сравнение эффекта от применения профилактического лака Flairesse (зуб 1, 1) и продукта-конкурента (зуб 2, 1).

Flairesse



Паста – упаковка

1 тубик (75 мл)

- Со вкусом мяты, с мелкими абразивными частицами
- Со вкусом мяты, с абразивными частицами среднего размера
- Со вкусом мяты, с крупными абразивными частицами
- Со вкусом дыни, с мелкими абразивными частицами
- Со вкусом дыни, с абразивными частицами среднего размера
- Со вкусом дыни, с крупными абразивными частицами

REF 220417
REF 220418
REF 220419
REF 220423
REF 220424
REF 220425



Паста – упаковка

200 отдельных доз (по 1,8 г)

1 автоклавируемое профессиональное кольцо

- Со вкусом мяты, с мелкими абразивными частицами
- Со вкусом мяты, с абразивными частицами среднего размера
- Со вкусом мяты, с крупными абразивными частицами
- Со вкусом дыни, с мелкими абразивными частицами
- Со вкусом дыни, с абразивными частицами среднего размера
- Со вкусом дыни, с крупными абразивными частицами

REF 220414
REF 220415
REF 220416
REF 220420
REF 220421
REF 220422



Гель – упаковка

1 флакон (480 мл)

- Со вкусом мяты
- Со вкусом дыни
- Со вкусом клубники

REF 220411
REF 220412
REF 220413



Пенка – упаковка

1 флакон (125 г)

- Со вкусом мяты
- Со вкусом дыни
- Со вкусом клубники

REF 220408
REF 220409
REF 220410



Лак – упаковка

35 отдельных доз (по 0,4 мл)

35 одноразовых аппликационных кисточек

- Со вкусом мяты
- Со вкусом дыни

REF 220404
REF 220405

www.dmg-dental.com



БЕЛОМНИМЕД
ГРУППА КОМПАНИЙ

Официальный представитель в Республике Беларусь

МЧУП "Фармакорс"

1-й Твердый переулок, дом 5, офис 100

220037 г. Минск

тел. 8017 2948511, 8017 2853444

факс 8017 2100522

e-mail: info@belomnimed.by

www.belomnimed.by

DMG
Dental Milestones Guaranteed