

myobrace®

МИОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ОРТОДОНТИЯ С БРЕКЕТАМИ

Серия Myobrace for Braces™
для постоянного прикуса с брекетами.




Вестибулярные
брекеты

Лингвальные брекеты

Расширение зубной дуги

Ретенция

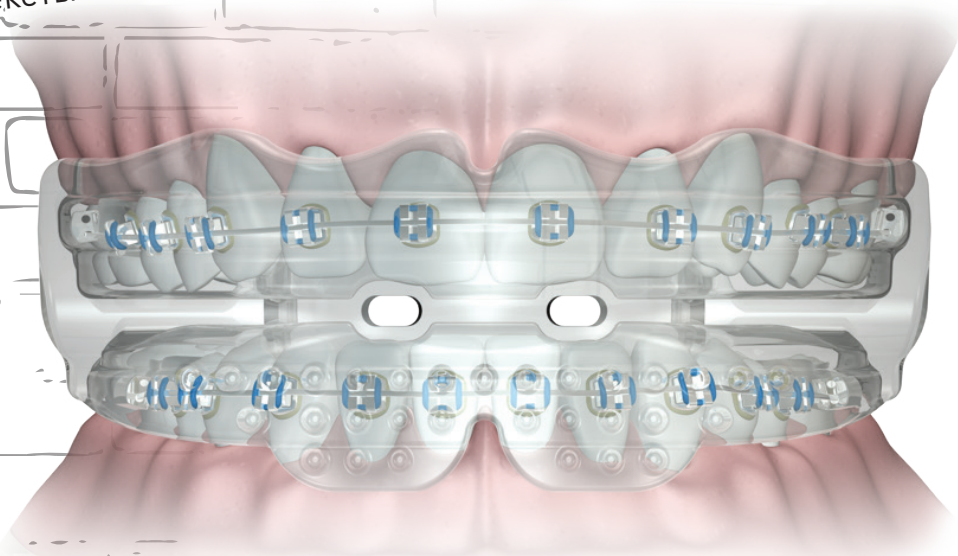

Повышает эффективность ортодонтического лечения на брекетах
за счёт исправления функции дыхательных путей
и нейромышечной дисфункции.

www.myoresearch.com

myobrace®

Миофункциональная ортодонтия


Более 25 лет назад компания *Myofunctional Research Co (MRC)* стала выпускать стандартные аппараты для исправления вредных привычек, таких как ротовое дыхание, прокладывание языка между зубами и неправильное глотание. Аппараты можно использовать до, во время и после лечения на несъёмных брекетах, чтобы повысить эффективность ортодонтического лечения, особенно в трудных случаях. Лучше всего использовать аппараты в раннем постоянном прикусе.

«В большинстве случаев аномалии прикуса связаны с нарушением дыхания и нейро-мышечной дисфункцией.»


Дыхание и нейромышечная дисфункция не только вызывают аномалии прикуса, но и замедляют ортодонтическое лечение и ведут к рецидиву. Кроме того, если нарушения дыхания и нейромышечную дисфункцию не лечить, могут развиваться и другие проблемы со здоровьем, такие как дисфункция ВНС и расстройства сна. Серия *Myobrace for Braces™* помогает лечить вредные миофункциональные привычки одновременно с ортодонтическим лечением на брекетах.

Пациенты всё чаще выбирают ортодонтическое лечение без удаления зубов. Система *Myobrace* используется с самолигирующимися брекет-системами для достижения оптимальной формы верхней зубной дуги.

Myobrace® способствует развитию зубных дуг, т.к. язык занимает правильное положение, поднимаясь к верхней челюсти. Лечение проходит быстрее, и даёт более стабильные результаты, даже в сложных случаях.

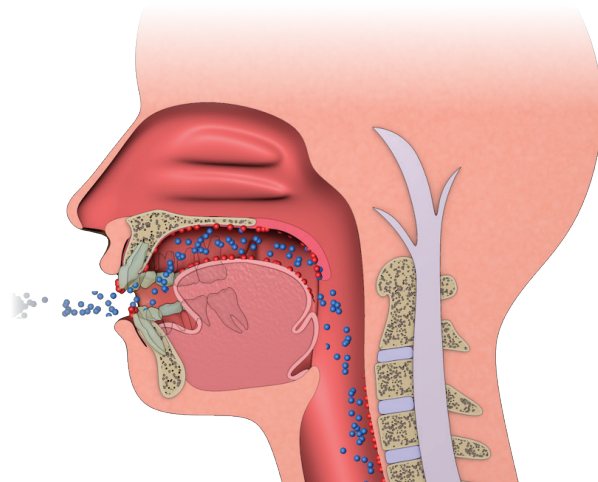

СЕРИЯ MYOBACE FOR BRACES™ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ДЫХАНИЯ

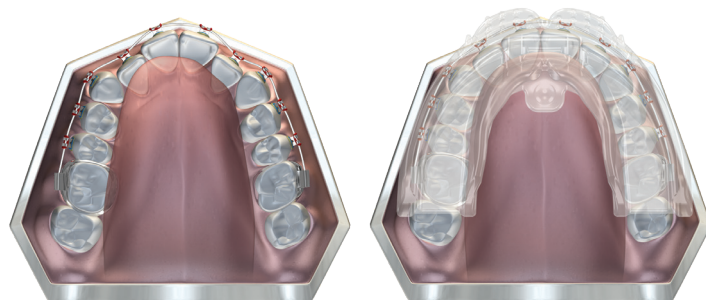

РАСШИРЕНИЕ ЗУБНОЙ ДУГИ АППАРАТАМИ V1 И V2


Как работает *Myobrace®*

Компания *MRC* лидирует в применении аппаратов ранней миофункциональной коррекции для детей. С ними ортодонтическое лечение становится проще, эффективнее и стабильнее. Ключевой аспект лечения — научить ребёнка дышать носом, держать язык прижатым к нёбу, и путём тренировок восстановить функцию ротовых мышц.

Результаты лечения:

- Более эффективное и стабильное расширение верхней челюсти.
- Сокращение срока лечения в сложных случаях, таких как открытый прикус.
- Коррекция аномалий II класса без сильного механического воздействия.


- Снижение риска развития дисфункции ВНС и нарушений сна в будущем.
- Как правило, улучшается развитие лица.

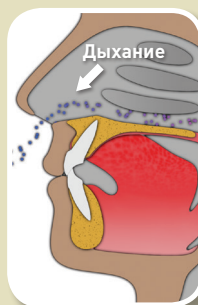

Правильное дыхание



Правильное положение языка

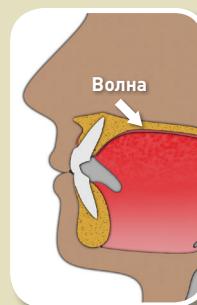

Правильный тип глотания

Посетите сайт www.myoresearch.com, чтобы посмотреть исследования.


Myobrace for Braces™

**PERMANENT
DENTITION
WITH BRACES**


зубов в постоянном прикусе.

Действие аппаратов направлено на коррекцию миофункциональных привычек, ведущих к скученности зубов. Аппараты оказывают легкое расширяющее действие на верхнюю челюсть, выравнивая зубные дуги и помогая брекетам перемещать зубы в правильное положение.

Серия Myobrace for Braces™ рассчитана на три этапа лечения. Она разработана специально для использования с брекетами для исправления вредных миофункциональных привычек, развития обеих челюстей и дополнительного выравнивания

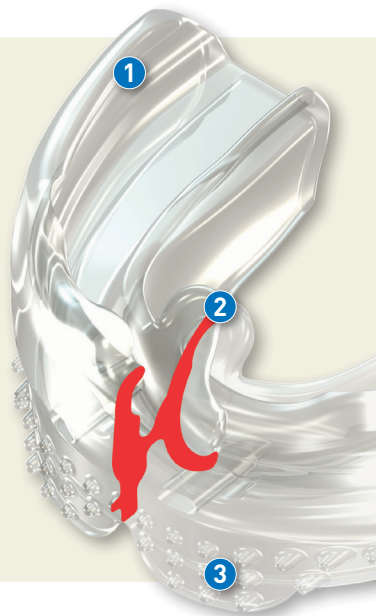

- 1 Канал для брекетов** — для размещения верхних (и нижних) брекетов и ортодонтической дуги, а также для защиты щёк и дёсен.
- 2 Маркерный язычок, ограничитель и элеваторы для языка** — вырабатывают правильное положение языка в куполе нёба.
- 3 Увеличенный губной бампер и высокие борта** — снимают гиперактивность губ и способствуют носовому дыханию.

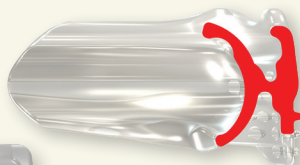

АППАРАТ B1 (слева)
B1 — ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ (вверху)

MYOBACE® B1

Аппарат *B1* исправляет вредные привычки.

У него есть канал для брекетов, маркерный язычок, ограничитель и элеваторы для языка, увеличенные губные бамперы и высокие борта для исправления положения языка, снятия гиперактивности губ и нормализации носового дыхания в процессе лечения на несъёмных брекетах.




АППАРАТ B1 LING (слева)
B1 LING — ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ (вверху)

MYOBACE® B1 LING

Аппарат *B1 LING* исправляет вредные привычки.

У него есть канал для брекетов, маркерный язычок, ограничитель и элеваторы для языка, увеличенные губные бамперы и высокие борта для исправления положения языка, снятия гиперактивности губ и нормализации носового дыхания в процессе лечения на несъёмных лингвальных брекетах.


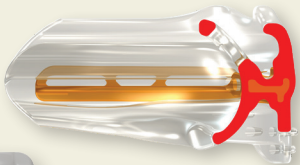


АППАРАТ B2 (слева)
B2 — ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ (вверху)

MYOBACE® B2

Аппарат *B2* развивает зубную дугу.

У него есть канал для лингвальных брекетов, каркас *Dynamicore™*, маркерный язычок, ограничитель и элеваторы для языка, увеличенные губные бамперы и высокие борта для исправления положения языка, снятия гиперактивности губ и нормализации носового дыхания в процессе лечения на несъёмных брекетах.

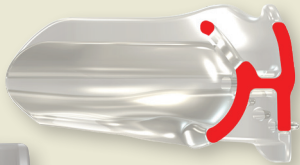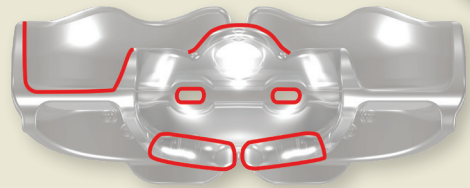

АППАРАТ B3 (слева)
B3 — ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ (вверху)

MYOBACE® B3

Аппарат *B3* исправляет вредные привычки на этапе ретенции.

У него есть расширенный канал, маркерный язычок, ограничитель и элеваторы для языка, увеличенные губные бамперы и высокие борта для исправления положения языка, снятия гиперактивности губ и нормализации носового дыхания в процессе лечения на элайнерах.

**ИСПРАВЛЕНИЕ
ПРИВЫЧЕК**

ЭТАП 1

**РАСШИРЕНИЕ
ЗУБНОЙ ДУГИ**

ЭТАП 2

**ИСПРАВЛЕНИЕ
ПРИВЫЧЕК
НА ЭТАПЕ
РЕТЕНЦИИ**

ЭТАП 3

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Шаг 1 Изучение материалов

Первым делом ознакомьтесь с материалами на сайте myoresearch.com. Там вы найдете подробную информацию о миофункциональной ортодонтии и системе аппаратов MRC. Это позволит вам приступить к лечению простых случаев.

Шаг 2 Встреча с представителем MRC

Обратитесь к ближайшему представителю MRC, чтобы получить подробную информацию об аппаратах и методах лечения. Он также сообщит вам о курсах MRC, предоставит необходимые материалы для обучения врачей, сотрудников и пациентов клиники.

Шаг 3 Посещение обучающего курса

Наш курс позволит вам изучить более широкий ряд клинических случаев, достичь сотрудничества с пациентом и повысить коммерческую отдачу от лечения. Данный курс обучает внедрению метода миофункциональной коррекции в практику для оптимизации лечения каждого случая.



Посетите практический семинар MRC

Миллионы детей страдают аномалиями прикуса. Традиционное ортодонтическое лечение выравнивает зубы, но не лечит причины нарушений.

Чтобы не наступил рецидив, пациенту приходится всю жизнь носить ретейнеры. Миофункциональная ортодонтия одновременно лечит верхние дыхательные пути и нейромышечную дисфункцию. Это шаг вперёд для специалистов в области стоматологии, и отличное современное решение для детей.

Чтобы узнать, как лечить аномалии прикуса по системе компании MRC, посетите семинары опытных врачей компании MRC, регулярно использующих этот метод в своей практике в Сертифицированных центрах *Myobrace*®. Эта система лечения быстро набирает популярность у пациентов и врачей. Компания MRC на своём примере показывает, насколько она выгодна при правильном применении.

Если вы хотите начать использовать аппараты компании MRC, свяжитесь с ближайшим представителем компании, или зайдите на сайт myoresearch.com.



ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ КЛИНИК MYOBRACE

Программы поддержки клиник *Myobrace*® разработаны для стоматологов и ортодонт, желающих быстро и эффективно ввести миофункциональную ортодонтию в свою практику.

Международная сеть программы объединяет стоматологов и ортодонт, стремящихся предоставить своим пациентам полное и высококачественное миофункциональное ортодонтическое лечение. Специалистам, участвующим в Программе поддержки клиник *Myobrace*®, предоставляется доступ к образовательным и вспомогательным материалам, разработанным компанией MRC.

Для чего получать статус Участника программы Myobrace®?

- Вы сможете лечить больше пациентов от 5 до 15 лет.
- Увеличится количество пациентов в вашей клинике.
- Сократится время, проведенное пациентом в кресле врача.
- Лечение будет финансово выгодно как для врачей, так и для пациентов.
- Ортодонты будут улучшать здоровье детей, а не только эстетику.



Более подробную информацию можно получить на сайте www.myoresearch.com или у представителя компании MRC

Дистрибьютор в Республике Беларусь:

УП "Фармакорс"

1-й Твердый переулок, 5-100

220038 Минск

Тел.: +375 17 2853444, +375 17 2948511

Розничная продажа:

УП "Дэнтстор"

Минск, ул. Сухая 4, пом. 17, тел. +375296626747

Могилев, ул. Лепешинского 14, тел. +375445905657

Производитель:

Myofunctional Research Co.

44 Siganto Drive, Helensvale QLD, 4212 Australia

australia.hq@myoresearch.com

Тел: 61 7 5573 5999



Посетите сайт www.myoresearch.com

MYOBRACE® от компании MYOFUNCTIONAL RESEARCH CO.

